



**CEINFER S.A.S**  
Central De Insumos Ferreteros



# TERMOMETRO INFRARROJO

## SIN CONTACTO JRT 018

### DETALLES

El termómetro infrarrojo corporal sin contacto está especialmente diseñado para medir la temperatura corporal de una persona, independientemente de la temperatura ambiente.

Dependiendo de varios tipos de piel y grosor, puede haber una diferencia de temperatura. Cuando la temperatura interior es significativamente diferente, el termómetro infrarrojo del cuerpo debe colocarse en esa habitación durante 15-20 minutos antes de usarlo.

### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla digital LCD retroiluminada, ligera y portátil para su uso.
- Puntero láser incorporado, medición infrarroja precisa sin contacto.
- 2 unidades de temperatura para la conversión: Fahrenheit o Celsius, mantenga presionado "MODE" más de 5 segundos.
- Selección de modos de medición para diversas necesidades convenientemente.
- Medición de la temperatura corporal: apuntando hacia la frente con una distancia de 1-15 cm.
- Color de retroiluminación diferente para un rango de temperatura diferente en el modo CUERPO.
- Medición de la temperatura del objeto: medición de la temperatura de la superficie de un objeto, temperatura del agua del baño del bebé o temperatura de la leche, etc.
- Rango de selección automática y resolución de pantalla 0.1 ° C / 0.1 ° F.
- Función automática de retención de datos y función de apagado automático.
- Selección para zumbador; establecer el valor de alarma (el valor predeterminado de la alarma es 38 ° C / 100.4 ° F).
- Memorización de los últimos 32 grupos de datos de medición.



## DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- F1: cuando la temperatura corporal excede la temperatura de la alarma (el valor predeterminado es 38 ° C), mostrará la luz de fondo roja y la alarma;
- F2: calibración (valor predeterminado 0), puede configurar cuando hay una desviación de temperatura;
- F3: interruptor de alarma (ENCENDIDO-APAGADO), cuando encienda la alarma, aparecerá en la pantalla el icono del altavoz;
- F4: selección de modos (BODY predeterminado), la pantalla mostrará "Body temp" en el modo BODY.



## DESCRIPCIÓN DEL COLOR DE LA LUZ DE FONDO (SOLO MODO CORPORAL):



**32-37.3°C**  
**LUZ DE FONDO VERDE**

La temperatura corporal es normal



**37.3-F1**  
**LUZ DE FONDO AMARILLA**

La temperatura corporal es alta pero no excede la temperatura de la alarma



**37.3-F1**  
**LUZ DE FONDO ROJA**

La temperatura corporal supera la F1 y las alarmas.

## ESPECIFICACIONES



**A:** 116.6 mm / 4.59 in

**B:** 45 mm / 1.77 in

**C:** 155 mm / 6.10 in

**Net Weight:**

113g  
(Whithout Battery)

- Lugar de origen: China
- Modelo: JRT - 018
- Color: Azul claro
- Material: plástico ABS
- Resolución de pantalla: 0.1 ° C (0.1 ° F)
- Medición de la temperatura corporal: 32.0-43 ° C / 90-109.4 ° F
- Medición de temperatura ambiente: 0-60 ° C / 32-140 ° F
- Precisión: (+/-) 0.2 ° C
- Distancia de medición: 3 a 5 cm
- Tiempo de apagado automático: aproximadamente 7 s
- Fuente de alimentación: 2 \* 1.5V pilas AAA (NO incluidas)
- Temperatura de funcionamiento: 10-40 ° C / 50-104 ° F
- Temperatura de almacenamiento: 0-50 ° C / 32-122 ° F
- Humedad relativa: ≤85%
- Tamaño del artículo: 116.6 mm \* 45.4 mm \* 155 mm
- Peso del artículo: 113 g
- Vida útil: 5 años

**Garantía:** 6 meses, el vendedor y fabricante reemplazarán el producto solo si se aprueba un defecto de fábrica, además no se harán responsables de todo lo que pueda ocasionar un mal uso del producto.

### LISTA DE PAQUETE

- 1 \* termómetro IR sin contacto
- 1 \* bolsa de tela
- 1 \* Manual de usuario (inglés)

**Nota:** Este producto tiene certificación CE, FDA, y visto bueno por parte del invima.

### CONTÁCTENOS

Bogotá – Colombia

**Teléfonos:** (571) 704 8020

**Cel:** (316) 874 3146 • (304) 240 1888

directorcomercial@ceinfer.com.co

comercial1@ceinfer.com.co

Asesor Comercial Bucaramanga

comercial1@ceinfer.com.co

**Cel:** 315 846 7752

**WWW.CEINFER.COM.CO**

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS